

Gebrauchsanweisung für KINDstarLink Mikrofon 2.0



Zubehör für:

Wireless LE-Audio-fähige Hörsysteme

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen StarLink Edge Remote-Microphone!

Ihr Remote-Microphone verstärkt die Stimme Ihres Gesprächspartners in schwierigen Hörsituationen, damit Sie Unterhaltungen besser verstehen und aktiv am Geschehen um Sie herum teilnehmen können. Ebenfalls kann es den TV und andere Audioquellen verstärken.

Folgen Sie dieser Anleitung, um loszulegen.

Inhaltsverzeichnis

1. Über Ihr Remote-Microphone

Lernen Sie Ihr Remote-Microphone kennen.....	23
Verwendung Ihres Remote-Microphone.....	24
Einrichten des Remote-Microphones.....	24
Kopplung mit Hörsystemen.....	25
Tragen des Remote-Microphones.....	29
Laden des Remote-Microphones.....	29

2. Hinweise zur Problembeseitigung.....31

3. Zusätzliche Hinweise

Verwendungszweck.....	33
FCC-Informationen.....	35
Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften.....	36

Lernen Sie Ihr Remote-Microphone kennen

Übersicht

1. **Ein/Aus Taste** Schaltet das Remote-Microphone EIN/AUS.
2. **Kontrollleuchte**
Zeigt den aktuellen Betriebszustand Ihres Remote-Microphones an.
3. **Mikrofone**
Nimmt die Stimme des Sprechers auf, damit Sie sie hören können.
4. **Stromanschluss (USB-C)**
Zum Anschließen des Netzteils.
5. **Clip**
Befestigt das Remote-Microphone an der Kleidung des Sprechers.
6. **Kopplungstaste**
Koppelt das Remote-Microphone mit Ihrem Hörsystem.
7. **Lautstärkereglер/Hörprogramm Wechsel**
Stellt die Lautstärke oder die Hörsystem ein anderen Hörprogramm um.



Verwendung Ihres Remote-Microphone

Ihr Remote-Microphone soll die Sprache verbessern und Ihnen dabei helfen, Gespräche mit einer anderen Person zu führen.



Sie können auch versuchen, Ihr Remote-Microphone in der Nähe Ihres Fernsehers zu platzieren, um den Ton besser zu hören. Für beste Ergebnisse verwenden Sie einen TV-Streamer. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hörakustiker.

Kopplung mit Hörsystemen

Bevor Sie Ihr Remote-Microphone zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit Ihrem Hörsystem bzw. Ihren Hörsystemen koppeln. So kann Ihr Zubehör Ihre Hörsysteme erkennen, damit sie zusammen arbeiten können.

Einrichten des Remote-Microphones

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie das Remote-Microphone mit dem Taster **EIN** oder **AUS**:

- **Einschalten:** Schieben Sie den Schalter zur LED. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang weiß.
- **Ausschalten:** Schieben Sie den Schalter von der LED weg. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang rot. Neben dem Schalter ist eine orangefarbene Markierung zu sehen.



Kopplung mit Hörsystemen

Bevor Sie Ihr Remote-Microphone zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit Ihrem Hörsystem bzw. Ihren Hörsystemen koppeln. So kann Ihr Zubehör Ihre Hörsysteme erkennen, damit sie zusammen arbeiten können.

SCHRITT 1: Schalten Sie Ihr Remote-Microphone ein.

SCHRITT 2: Schalten Sie Ihre Hörsysteme aus und dann wieder ein.

- Wenn Ihr Hörsystem wiederaufladbar ist, legen Sie es 3 Sekunden lang in das Ladegerät und nehmen Sie es heraus. Wenn Ihr Hörsystem über eine Batterie verfügt, öffnen und schließen Sie das Batteriefach.
- **Für CROS-Hörsysteme:** Schalten Sie Ihr Hörsystem und den CROS-Sender AUS. Schalten Sie anschließend Ihr Hörsystem **EIN**, aber lassen Sie den CROS-Sender auf **AUS**.

SCHRITT 3: Koppeln Sie das Remote-Microphone mit Ihrem Hörsystem bzw. Ihren Hörsystemen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme nicht mit Bluetooth®-Geräten in der Nähe verbunden sind.
 - Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone **AUS**.
 - **Schalten Sie jegliches drahtlose Zubehör aus, das bereits mit Ihren Hörsystemen gekoppelt ist.**
2. Platzieren Sie Ihre Hörsysteme in einem Abstand von maximal 15 cm (6 Zoll) zu Ihrem Remote-Microphone. Je näher, desto besser für eine optimale Verbindung.

3. Drücken und halten Sie die Kopplungstaste 2 Sekunden lang gedrückt; die LED-Leuchte blinkt grün. Innerhalb einer Minute leuchtet die LED 2 Sekunden lang fortwährend grün, wenn die Kopplung mit den einzelnen Hörsystemen abgeschlossen ist.*



Fertig! Gehen Sie zur nächsten Seite, um mit der Verwendung Ihres Remote-Microphones zu beginnen.

Verwenden Sie Ihr Remote-Microphone

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme eingeschaltet sind.

SCHRITT 2:

- **Schalten Sie das Remote-Microphone ein:**
Das Audio-Streaming beginnt im Hörsystem automatisch.
- **Streaming wird für Streams mit höherer Priorität unterbrochen**, d. h. Telefonanrufe, Medienstreams von Ihrem Smartphone.

SCHRITT 3: Schalten Sie das Remote-Microphone aus:

Das Audio-Streaming wird gestoppt, wenn das Remote-Microphone ausgeschaltet ist.

* Wenn das grüne Licht 2 Sekunden lang nicht leuchtet, wiederholen Sie die Schritte 1–3.

SCHRITT 4: Passen Sie die Streaming-Lautstärke an.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Tasten für den Lautstärkeregler an der Seite des Remote-Microphones nach oben oder nach unten.
- Drücken (oder tippen) Sie auf die **Bedienelemente Ihres Hörsystems**.*
- Passen Sie die Lautstärke auf dem Zubehörbildschirm Ihrer kompatiblen mobilen App an.

SCHRITT 5: Ändern Sie das Hörprogramm.

Durch langes Drücken (2 Sekunden) der Lautstärketasten können Sie durch die Hörprogramme schalten, die Ihre Hörakustiker für Sie programmiert haben.

SCHRITT 6: Verwenden Sie Ihr Remote-Microphone als Fernbedienung. Wenn das Remote Mic eingeschaltet oder ausgeschaltet ist/kein Streaming-Signal sendet, kann es:

- Die Lautstärke Ihres Hörsystems mit einem kurzen Druck auf die Tasten +/- ändern.
- Das Programm Ihres Hörsystems mit einem langen Druck auf die Tasten +/- ändern.

HINWEIS: In Ihrem Hörsystem ertönt ein akustisches Signal, um Sie auf einen niedrigen Akkustand am Remote-Microphone aufmerksam zu machen.

* Die Steuerung Ihres Remote-Microphones mit dieser Funktion muss von Ihrem Hörakustiker eingerichtet werden.

Anzeigeleuchte

Die Anzeigeleuchte zeigt die aktuelle Betriebsart Ihres Remote-Microphones an:

Status der Anzeigeleuchte	Betriebsstatus
Durchgehend rot für 2 Sekunden	Getrennt vom Ladekabel
Durchgehend weiß für 2 Sekunden	Eingeschaltet
Langsames Blinken weiß	Eingeschaltet, kein Streaming
Blinkt grün und wird dauerhaft grün	Koppelt, bis es gekoppelt ist
Blinkt grün und wird dauerhaft rot	Kopplung fehlgeschlagen
Durchgehend rot für 2 Sekunden	Wenn 30 Minuten lang keine Verbindung zu HAs besteht, wechselt das Remote-Microphone in den Ruhezustand (und wacht bei jedem Tastendruck auf).
Weißer LED	Wenn eine Taste gedrückt wird
Doppelpuls weiß	Während des Streamings
Puls rot	Akku schwach
Akustische Anzeige	Bei HA mit niedrigem Akkustand (3 Töne)
Durchgehend rot für 2 Sekunden	Ausgeschaltet (über Bedienelement oder schwacher Akku)


HINWEIS: Der typische drahtlose Betriebsbereich beträgt bis zu 15 m (50 Fuß). Dies kann durch Umweltfaktoren (z. B. Hindernisse, Störungen, Position der Menschen) verkürzt werden. Größere Betriebsbereiche sind möglich, aber Ihre Audio- oder Verbindungsqualität kann abnehmen.

Tragen Ihres Remote-Microphones

Ihr Remote-Microphone kann von der Person, die spricht, an der Kleidung befestigt werden. Es ist am besten, es innerhalb von 20 cm (8 Zoll) vom Mund der Person zu platzieren.

Anweisungen zur Kleidung:

1. Drücken Sie den Clip des Remote-Microphones, bis er sich öffnet.
2. Schieben Sie die Öffnung des Clips auf die Kleidung.
3. Lösen Sie den Clip.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Remote-Microphone sicher an der Kleidung befestigt ist.

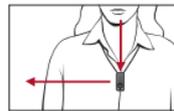

Laden Ihres Remote-Microphones

Die Anzeigeleuchte des Remote-Microphones blinkt rot, und Sie hören während des Streamings ein akustisches Signal, wenn der Akkustand niedrig ist. Sofern der Akku vollständig entladen ist, leuchtet die weiße Anzeige nicht auf, wenn das Remote-Microphone eingeschaltet wird.

1. Schließen Sie das USB-C-Ende des Ladekabels an den USB-C-Anschluss an Ihrem Remote-Microphone an.
2. Schließen Sie das USB-Ende des Kabels an einen Netzadapter an.



3. Schließen Sie den Netzadapter an eine externe Stromquelle an, z. B. eine Steckdose.
4. Überprüfen Sie den Ladestatus mithilfe der Anzeigeleuchte an Ihrem Remote-Microphone.
 - Durchgehend weiße LED während des Ladevorgangs
 - Keine LED bei voller Ladung
 - Ihr Remote-Microphone wird in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen
 - Das Remote-Microphone funktioniert je nach Lautstärkeinstellungen und Geräuschpegel etwa 10 Stunden, bevor es entladen ist.

Erinnerung – Das Aufladen Ihres Remote-Microphones kann länger dauern, wenn Sie während des Aufladens Audio streamen. Der Ladevorgang ist in der Regel schneller, wenn das Remote-Microphone ausgeschaltet ist.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Probleme mit Ihrem Remote-Microphone? Probieren Sie diese Tipps aus. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren betreuenden Hörakustiker.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Ein (oder beide) Hörsystem(e) überträgt/übertragen keine Audioinhalte mehr.	Hörsysteme liegen möglicherweise fast außerhalb des drahtlosen Bereichs.	Gehen Sie näher an Ihr Remote-Microphone heran.
	Der Akkuladezustand in Ihrem Hörsystem kann Audio-Streaming nicht mehr unterstützen.	Ersetzen Sie den Akku in Ihrem Hörsystem durch einen neuen. ODER Laden Sie Ihr Hörsystem auf.
Ein (oder beide) Hörsystem(e) überträgt/übertragen keine Audioinhalte mehr.	Drahtlose Verbindung zum Remote-Microphone unterbrochen.	Starten Sie das Audio-Streaming neu. Schalten Sie das Remote-Microphone AUS und wieder EIN.
Verzerrte Tonqualität von gestreamtem Audio.	Niedriger Akkustand im Remote-Microphone.	Laden Sie Ihr Remote-Microphone auf. Siehe <i>Laden Ihres Remote-Microphones</i> auf S. 29.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Es ist schwierig, eine andere Person in einer lauten Umgebung zu hören.	Das Remote-Microphone ist möglicherweise zu weit von der sprechenden Person entfernt.	Bewegen Sie das Remote-Microphone näher an den Mund des Sprechers heran.
	Das Remote-Microphone wird möglicherweise von der Kleidung verdeckt oder ist falsch positioniert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decken Sie das Remote-Microphone bei Bedarf ab. 2. Positionieren Sie das Remote-Microphone in der Nähe des Mundes des Sprechers.
Die Anzeigeleuchte blinkt zweimal weiß, aber der Ton wird nicht an die Hörsysteme übertragen.	Die Hörsysteme sind nicht bereit, gestreamte Audiosignale zu empfangen.	Schalten Sie die Hörsysteme AUS und wieder EIN.

Verwendungszweck

Das Remote-Microphone ist ein Zubehör für ein drahtloses 2,4-GHz-Hörsystem. Es ist als drahtloser Sender für Ton von einer Audioquelle an Hörsysteme gedacht. Wenn es von einem entfernten Sprecher in einer lauten Umgebung getragen wird, dient es als Hilfsmittel zum Hören.

Das Remote-Microphone entspricht den strengsten Normen der internationalen elektromagnetischen Verträglichkeit. Trotzdem ist es möglich, dass Störungen durch Stromleitungen, Metalldetektoren an Flughäfen, elektromagnetische Felder von anderen Medizinprodukten, Funksignalen und elektrostatistischen Entladungen auftreten.

Für das Remote-Microphone ist die Reinigung mit einem mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch vorgesehen.

Wenn Sie andere Medizinprodukte verwenden oder implantierbare Medizinprodukte wie Defibrillatoren oder Herzschrittmacher tragen und befürchten, dass Ihr Remote-Microphone Ihr Medizinprodukt stören könnte, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres Medizinprodukts, um Informationen über das Störungsrisiko zu erhalten. Das Remote-Microphone sollte nicht während einer MRT-Untersuchung oder in einer Überdruckkammer verwendet werden. Ihr Remote-Microphone ist nicht offiziell für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie sie in Kohlebergwerken oder bestimmten Chemiefabriken zu finden sind.

Verwendung in Flugzeugen

Ihr Remote-Microphone sollte nicht in Flugzeugen verwendet werden, es sei denn, dies wird ausdrücklich vom Flugpersonal gestattet.

Internationale Nutzung

Das Remote-Microphone ist für den Betrieb mit für Ihr Land oder Ihre Region spezifischen Hochfrequenzen zugelassen und darf möglicherweise nicht außerhalb Ihres Landes oder Ihrer Region verwendet werden.

Beachten Sie, dass der Betrieb auf internationalen Reisen zu Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten führen kann, oder dass andere elektronische Geräte Interferenzen mit Ihrem Remote-Microphone verursachen können.

Das Remote-Microphone ist für den Betrieb, die Lagerung und den Transport innerhalb eines Temperaturbereichs von -10 °C (14 °F) bis 45 °C (113 °F), einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 95 % und einer maximalen Höhe von 70 kPa bis 106 kPa (entspricht einer Höhe von 380 m unter dem Meeresspiegel bis 3.000 m) ausgelegt.



40 °C (104 °F).

Klinischer Nutzen

Das Zubehör selbst bietet keinen direkten klinischen Nutzen. Ein indirekter klinischer Nutzen wird dadurch erzielt, dass es dem übergeordneten Gerät (drahtloses Hörgerät) ermöglicht, seinen beabsichtigten Zweck zu erfüllen.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, folgende Warnhinweise zu geben:

⚠️ WARNUNG: Die Verwendung des Remote-Microphones direkt neben anderen elektronischen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Leistungseinbußen führen kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, achten Sie darauf, ob Ihr Hörsystem und die anderen Geräte normal funktionieren.

⚠️ WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller des Remote-Microphones bereitgestellt werden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen und zu einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit und zu Leistungseinbußen führen.

⚠️ WARNUNG: Wenn tragbare Hochfrequenz-Kommunikationsgeräte näher als 30 cm (12 Zoll) von Ihrem Remote-Microphone entfernt verwendet werden, kann dies zu Leistungseinbußen bei Ihrem Hörsystem führen. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie sich von den Kommunikationsgeräten.

Obwohl das Remote-Microphone nicht offiziell für den Schutz gegen das Eindringen von Staub oder Wasser zertifiziert (IP-zertifiziert) ist, wurde es gemäß IEC 60529 auf die Schutzart IP 5X getestet. Das bedeutet, dass das Remote-Microphone vor Staub geschützt ist.

Der Akku in Ihrem Remote-Microphone kann nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen. Das Remote-Microphone enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen oder modifizieren Sie es nicht.

Der mit dem Remote-Microphone verwendete USB-Netzadapter muss von einem staatlich anerkannten Prüflabor (in Nordamerika) für seine Sicherheit zertifiziert sein oder den geltenden nationalen elektrischen Sicherheitsstandards (in anderen Ländern) entsprechen.

Schließen Sie das Remote-Microphone nicht an Geräte an, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Die erwartete Lebensdauer des Remote-Microphones beträgt 3 Jahre.

Beschreibung der drahtlosen Technik

Das Remote-Microphone arbeitet im Frequenzband 2,4–2,4835 GHz mit einer maximalen effektiven Strahlungsleistung von 8 dBm bei der Übertragungsmodulationsart GFSK mit 2 MHz Bandbreite. Der Funkbereich des Empfängers hat eine Bandbreite von 2 MHz.

Das Remote-Microphone wurde nach den folgenden Emissions- und Störfestigkeitsprüfungen getestet und hat diese bestanden:

- IEC 60601-1-2-Anforderungen für Strahlungs- und Leitungsemissionen für ein Gerät der Gruppe 1, Klasse B, wie in CISPR 11 angegeben.
- Oberwellenverzerrung und Spannungsschwankungen, die sich auf die Stromquelle auswirken, wie in Tabelle 2 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- HF-Störfestigkeit bei einer Feldstärke von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,7 GHz sowie bei höheren Feldstärken von Kommunikationsgeräten, wie in Tabelle 9 in IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegenüber Magnetfeldern bei einer Feldstärke von 30 A/m und gegenüber in der Nähe befindlichen Magnetfeldern, wie in Tabelle 11 von IEC 60601-1-2 angegeben.

- Störfestigkeit gegenüber ESD-Werten von +/- 8 kV bei Leitungsentladung und +/- 15 kV bei Luftentladung.
- Störfestigkeit gegenüber schnellen elektrischen Transienten am Eingang der Stromquelle mit einem Niveau von +/- 2 kV bei einer Wiederholungsrate von 100 Hz.
- Störfestigkeit gegen Überspannungen an der Stromquelle von +/- 1 kV Leitung zu Leitung.
- Störfestigkeit gegenüber durch HF-Felder an der Stromquelle induzierte Leitungsstörungen, wie in Tabelle 6 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen an der Stromquelle, wie in Tabelle 6 von IEC 60601-1-2 angegeben.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER EREIGNISSE AN DIE EU

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit Ihrem Gerät aufgetreten ist, sollte Ihrem örtlichen Starkey-Vertreter und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind, gemeldet werden. Ein schwerwiegender Zwischenfall ist definiert als jede Fehlfunktion, Verschlechterung der Eigenschaften und/oder Leistung des Gerätes oder Unzulänglichkeit in der Bedienungsanleitung/in der Kennzeichnung des Gerätes, die zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Benutzers führen könnte ODER dies bei einem erneuten Auftreten tun könnte.

FCC-Informationen

HINWEISE ZUR FUNKTECHNIK

FCC-ID: EOA-24RME

IC: 6903A-24RME (Modell 960)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regelungen sowie den kanadischen ISED-Normen für lizenzfreie RSS. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können.

HINWEIS: Der Hersteller ist für Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs, die durch unbefugte Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht verantwortlich. Solche Veränderungen können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes erlischt.

Hiermit erklärt Starkey Laboratories, Inc., dass das Remote-Microphone die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist unter den folgenden Adressen und unter docs.starkeyhearingtechnologies.com erhältlich.

Hiermit erklärt Starkey Laboratories, Inc., dass das Remote-Microphone den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 in der geänderten Fassung entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs ist unter den folgenden Adressen und unter docs.starkeyhearingtechnologies.com erhältlich.

Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften

Für Service oder Reparatur wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Hörspezialisten. Bei Bedarf können Sie Ihr Hörgerät an folgende Adresse senden:

 **Starkey Laboratories, Inc.**
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Deutschland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Deutschland

Autorisierte Person im Vereinigten Königreich:

Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk



QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

Hersteller gem an Health Canada

Starkey Labs Canada Co.
2476 Argentia Road, Suite 301
Mississauga, ON L5N 6M1
www.starkeycanada.ca



Elektromüll muss gemäß den örtlichen Vorschriften behandelt werden.



Bedienungsanleitung konsultieren



Trocken halten

Hinweise zur Entsorgung von elektronischen Altgeräten

Starkey Laboratories, Inc. empfiehlt, die EU verlangt, und die Gesetze Ihrer Gemeinde schreiben möglicherweise vor, dass Ihr Remote-Microphone über das örtliche Recycling-/Entsorgungsverfahren für Elektronikgeräte entsorgt wird.

Die folgenden Anweisungen sind für das Entsorgungs-/Recyclingpersonal bestimmt. Geben Sie diese Anleitung bitte bei der Entsorgung Ihres Remote-Microphones mit.


NUR FÜR ENTSORGUNGS-/RECYCLINGPERSONAL

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku.

So entfernen Sie diesen Akku:

- Schalten Sie das Remote-Microphone aus.
- Nehmen Sie die Gehäusehälften mit einem kleinen Schraubendreher auseinander.
- Schneiden Sie die Akkukabel von der Platine ab, um einen versehentlichen Kurzschluss zu vermeiden.
- Entfernen Sie den Akku mit einer breiten flachen Klinge aus dem Gehäuse.

Solche Veränderungen können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes erlischt.

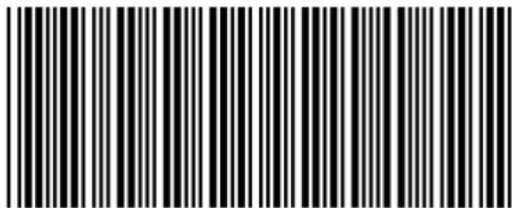

P00010567



CE

StarLink und Starkey sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

P00010567 2/25 BKLT3245-00-DE-KD

Patent: www.starkey.com/patents